

Surveillez la durée réelle de la thérapie avec la fonction du système de suivi de la thérapie

Le système de compression Cardinal Health™ Kendall SCD SmartFlow™, la nouvelle génération de compression Kendall™, est doté d'une technologie cliniquement éprouvée conçue pour appliquer une compression pneumatique intermittente (CPI) afin d'augmenter le flux sanguin veineux chez les patients à risque pour aider à prévenir la thrombose veineuse profonde (TVP) et l'embolie pulmonaire (EP), traiter la douleur et l'œdème liés à la stase veineuse et améliorer la circulation sanguine.



Système de suivi de la thérapie

La fonction de suivi de la thérapie du dispositif surveille la durée d'administration de la thérapie par compression au cours d'une tâche, d'une journée ou d'une hospitalisation donnée, jusqu'à six jours. Une fois le patient détecté, le contrôleur commence à suivre la durée de la thérapie et hors thérapie tout en fonctionnant de manière transparente en arrière-plan. Observez la durée de la thérapie en un coup d'œil sur l'écran du contrôleur.



Option Look Back (Retour en arrière)

Le système de suivi de la thérapie est doté d'une option Look Back (Retour en arrière) qui montre la durée de la thérapie au cours des dernières 8, 12 ou 24 heures. L'option Look Back (Retour en arrière) permet de ne pas perdre la thérapie du jour précédent.



Technologie Cardinal Health™ Patient Sensing™

En complément de la fonction de suivi de la thérapie, la technologie brevetée Cardinal Health™ Patient Sensing™ détecte automatiquement si une thérapie par compression est appliquée à un patient. Le contrôleur affiche une notification et émet un signal sonore lorsqu'il ne détecte aucun patient. Il continue cependant à effectuer des cycles de compression.



Périodes de thérapie et hors thérapie

La durée de la thérapie est indiquée par des segments bleus et les périodes hors thérapie sont indiquées par des segments orange. L'heure indiquée au centre de l'horloge de 24 heures indique l'heure cumulée pendant laquelle la thérapie a été administrée.

Pour plus d'informations ou pour commander, contactez votre représentant commercial

A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE UNIQUEMENT

Kendall SCD SmartFlow™ - Les contrôleurs Kendall SCD sont des dispositifs médicaux destinés à exercer une compression pneumatique intermittente pour accroître le débit sanguin veineux chez des patients à risque afin d'aider à prévenir une thrombose veineuse profonde et une embolie pulmonaire. Fabricant légal Cardinal Health 200, LLC, CE 0123. Classe IIa. Non inscrit sur la LPPR.

Manchons Kendall SCD™ COMFORT - Dispositif médical de classe I. Non Stérile/ Non mesurant Fabricant légal Cardinal Health 200, LLC. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les compresseurs KENDALL SCD SmartFlow™. Non inscrit sur la LPPR. Pour plus d'informations sur la disponibilité du produit,

veuillez contacter votre représentant Cardinal Health. Dans le cadre de sa politique de développement connu des produits, Cardinal Health se réserve le droit de changer les spécifications du produit sans notification préalable. Avant utilisation, lisez le mode d'emploi fourni avec ce dispositif pour connaître les indications, contre-indications, les effets indésirables, suggestions de procédure d'utilisation, avertissements et précautions. © 2024. Tous droits réservés. CARDINAL HEALTH, le LOGO Cardinal Health, KENDALL SCD sont des marques déposées de Cardinal Health et peuvent être enregistrées aux Etats-Unis et / ou dans d'autres pays. Crédit photos Cardinal Health. Cardinal Health France 506 SAS, 43 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, RCS Nanterre 812 365 609. Numéro de document 2MS22-2027836. Janvier 2025. Réalisation Verdana.

