

CATALOGUE DES RÉFÉRENCES

CRYO - S[®] Painless



CRYO - S[®] PAINLESS
ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES




CRYO-S Painless

Appareil de cryochirurgie avec cryosondes à usage unique et accessoires



Traitement de la douleur

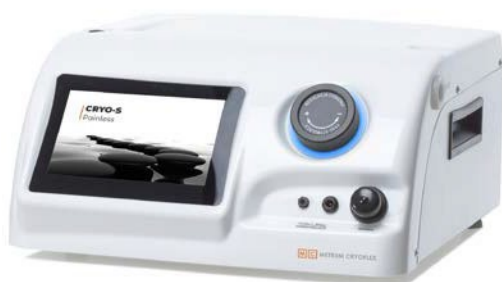

CE 2274

Le set comprend :

- Générateur et pédale à commande
- Câble de neurostimulation
- Adaptateur pour sonde à usage unique
- Capuchons de prise (alimentation en gaz, cryosonde) 2 pcs
- Tuyau de réservoir de gaz 0.5 mètre
- Tuyau de réservoir de gaz 3 mètres
- Câble d'électrode neutre
- Sets d'électrodes neutres (5 unités)
- Cordon d'alimentation électrique
- Pantographe
- Clé de connexion au réservoir de gaz
- Kit d'entretien

* les cryosondes ne sont pas incluses

Référence	Désignation
Device	
PU01N500001	CSEP-GENERATEUR POUR CRYONEUROLYSE CRYO-S® PAINLESS
PU01N500005	CSEPT-GENERATEUR POUR CRYONEUROLYSE CRYO-S® PAINLESS AVEC CHARIOT
PA06N100004	TRCSE-CHARIOT


Consommables :	
003774	R505/5 - Jeu d'électrodes passives à usage unique (5 pièces) - stérile




CRYOSONDES JETABLES
STÉRILES, À USAGE UNIQUE

A-08/20/N/RF


RÉFÉRENCE	SN06080220 - SONDE UU POUR CRYONEUROLYSE
PA01S260001	
Description	
 • Pointe biseau • Avec neurostimulation	
Indication	
Cryoanalgésie de la face, ex. zones supraorbitale, infraorbitale, intraorale, auriculotemporale, occipitale...	

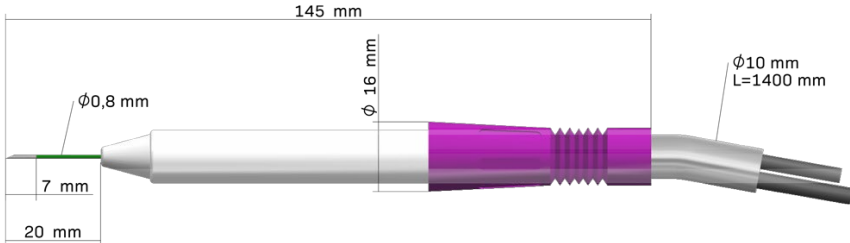


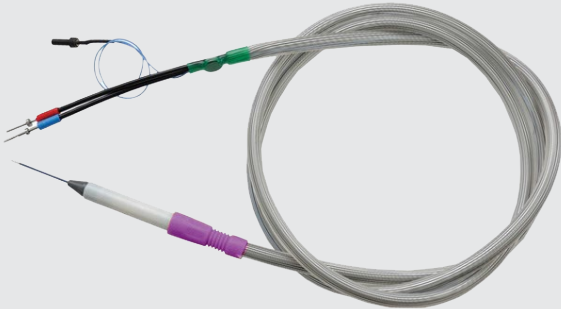

A-08/90/R/RF

RÉFÉRENCE	SN06080920 - SONDE UU POUR CRYONEUROLYSE
PA01S260003	
Description	
 • Pointe biseau • Avec neurostimulation	
Indication	
Cryoanalgésie de la face, ex. zones supraorbitale, infraorbitale, intraorale, auriculotemporale, occipitale...	

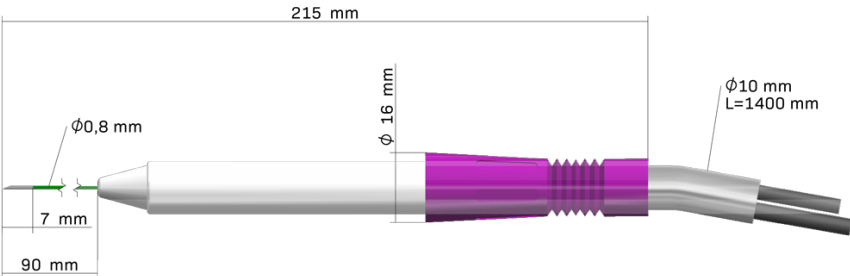

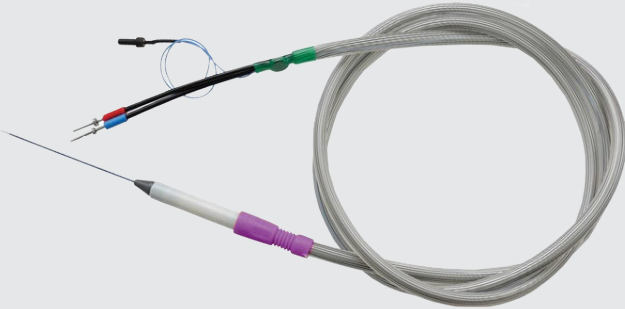


Introduceur BD vert inclus



A-13/120/R/RF

RÉFÉRENCE	SN06131210 - SONDE UU POUR CRYONEUROLYSE
PA01S260006	
Description	
	• Pointe ronde • Avec neurostimulation
Indication	
Cryoanalgésie de nerfs périphériques et facettes de la région cervicale.	

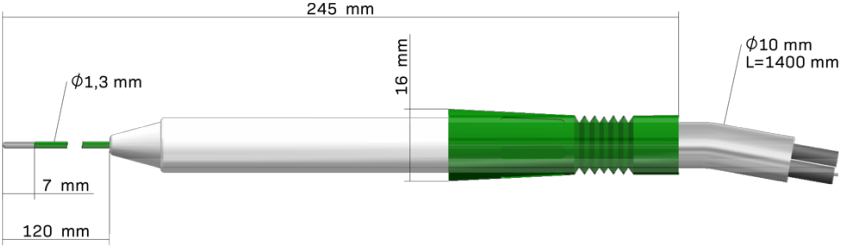

245 mm


16 mm

φ1,3 mm


7 mm

120 mm

φ10 mm
L=1400 mm

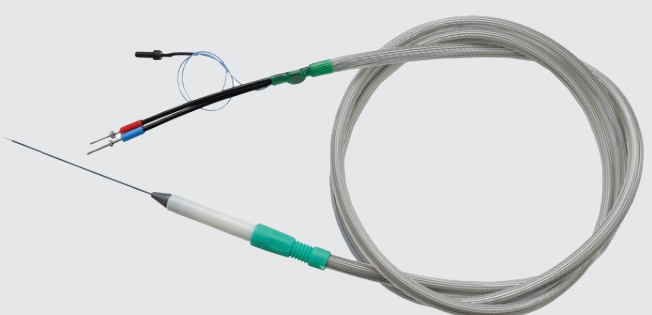


Introduceur BD
orange
inclus

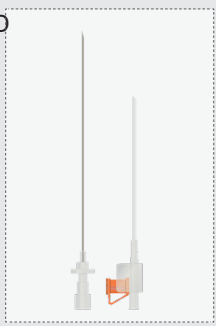

A-13/120/T/RF

RÉFÉRENCE	SN06131200 - SONDE UU POUR CRYONEUROLYSE
PA01S260005	
Description	
	• Pointe triangulaire • Avec neurostimulation
Indication	
Cryoanalgésie de nerfs périphériques et facettes de la région cervicale.	

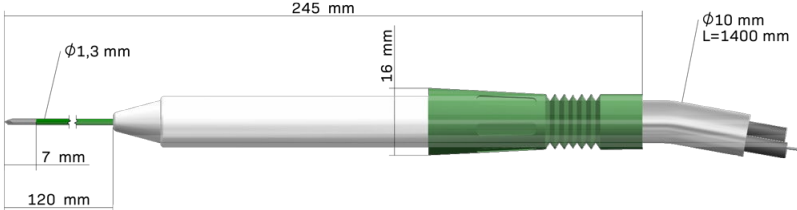

245 mm


16 mm

φ1,3 mm


7 mm

120 mm

φ10 mm
L=1400 mm

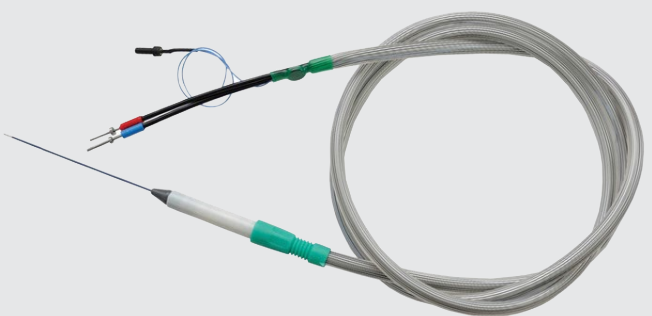


Introduceur BD
orange
inclus

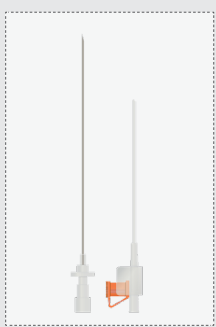


A-20/SIJ/T/RF

RÉFÉRENCE	SN06302200 - SONDE UU POUR CRYONEUROLYSE
PA01S260035	
Description	
Indication	

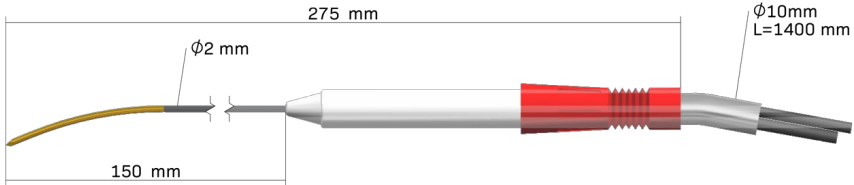

• Pointe triangulaire
 • Sans neurostimulation


Cryoanalgésie de l'articulation sacro-iliaque

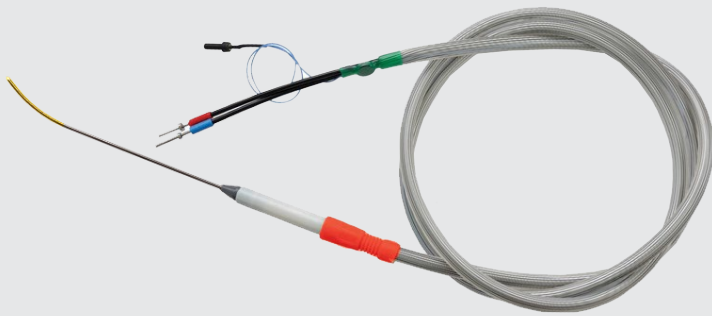

La date de péremption des cryosondes à usage unique est de 3 ans


A-30/PEA/R/RF

RÉFÉRENCE	S06303010 - SONDE UU POUR CRYONEUROLYSE PECTUS
PA01S260034	
Description	
Indication	

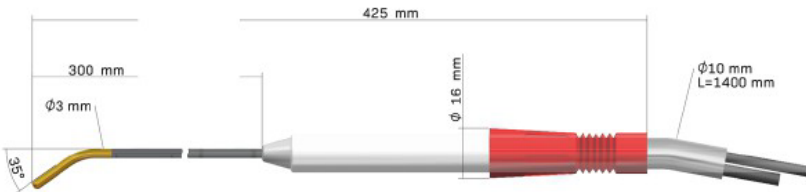


• Pointe ronde
 • Sans neurostimulation


Cryoanalgésie du nerf intercostal - thoracotomie, VATS, Pectus

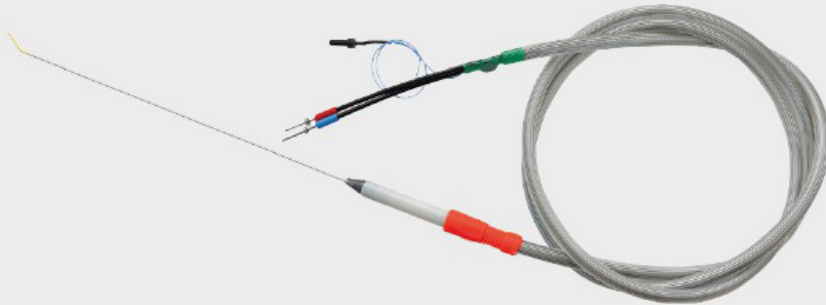



A-20/150/T/RF

RÉFÉRENCE	SN06300200 - SONDE UU POUR CRYONEUROLYSE
PA01S260037	
Description	
 • Pointe triangulaire • Avec neurostimulation	
Indication	
Cryoanalgésie de nerfs périphériques et facettes thoraciques, lombaires et sacrées.	

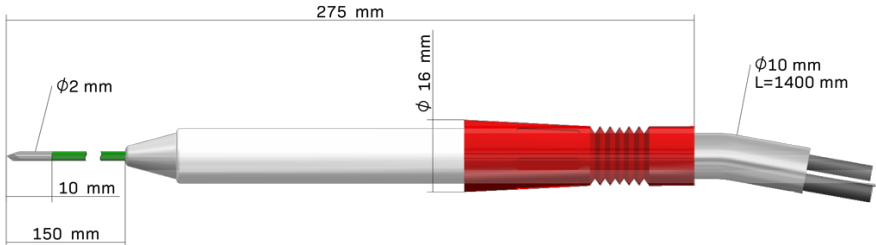

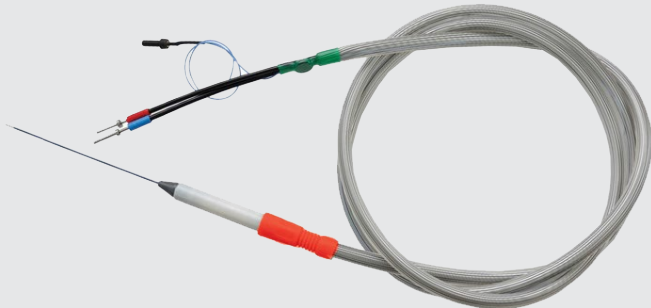

A-20/SIJ/T/RF

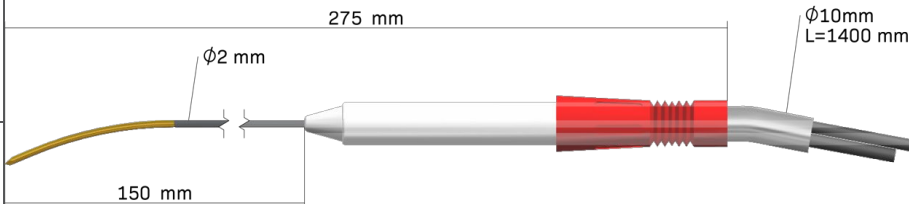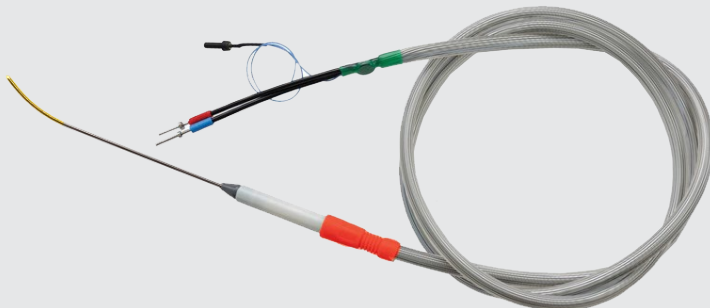RÉFÉRENCE	S06302200 – SONDE UU POUR CRYONEUROLYSE - GEN
TA01S260038	
Description	
 • Pointe triangulaire • Sans neurostimulation	
Indication	 Cryoanalgésie des nerfs périphériques.
	

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

CRYOSONDES

Il existe 3 modèles de cryosondes :

Forme de la Crysonde	Taille de la zone traitée	Forme de la boule de glace
Ronde	Jusqu'à 15 mm	Ronde
Triangulaire	Jusqu'à 10 mm	Elliptique
Triangulaire SIJ	Jusqu'à 40 mm	Elliptique
Biseau	Jusqu'à 6 mm	Goutte

Un introducteur est inclus pour les cryosondes de forme "ronde" et pour la crysonde de forme "biseau" longue (90 mm).

RONDE



1.3 mm

BISEAU



0.8 mm

TRIANGULAIRE



1.3 mm

CONSEILS SUR L'UTILISATION DES BOUTEILLES DE GAZ

Il est conseillé d'utiliser deux bouteilles de Dioxyde de Carbone de 20L, sans siphon (pour laparoscopie), stabilisées à température ambiante (2 heures environs avant la procédure), en position verticale, sur le chariot du générateur. La température de la pièce doit être comprise entre 18°C et 22°C pour garantir une pression de gaz efficace.

Les bouteilles en dessous de 6L ne sont pas recommandées. De même qu'il est déconseillé de stocker les bouteilles dans une pièce en dessous de 16°C. Un transport en position verticale est recommandé, sinon patienter 1h après remise en position verticale.

En cas de procédures répétées, il est conseillé de contrôler la pression de gaz de la bouteille, affichée sur l'écran du générateur, pour s'assurer du niveau suffisant de pression pendant la procédure. Lors de l'utilisation, la décompression entraîne une baisse de la température et donc de la pression. Il est alors possible de connecter la deuxième bouteille de gaz, le temps que la première bouteille revienne à température ambiante.



Distribué par :



31 rue des Alouettes - 95600 Eaubonne
www.gamida.fr | contact@gamida.fr
Tél. : 01 39 59 86 00



Fabriqué par :



Cryosondes. Dispositif médical de Classe IIb, fabriqué par METRUM CRYOFLEX. CE2274. Organisme de certification : Tüv Nord.
Non inscrit à la liste des produits et prestations remboursables prévue dans l'article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement la notice d'utilisation avant utilisation.
Document réservé à l'usage des professionnels de santé.
P1733A_v01_09.04.2024

Afin d'assurer la meilleure qualité des produits et services offerts, METRUM CRYOFLEX se réserve le droit de modifier les produits et d'introduire des changements dans les descriptions.